

Inhalátor a obličejová sauna 2v1

Návod k použití

model: C64-FS004



Všeobecná bezpečnostní upozornění

Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití! Odložte si tento návod k použití se záručním listem, pokladní blok a krabici s vnitřním obalem pro případ reklamace výrobku! Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti. Není určeno pro komerční použití. Když zařízení nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se vyskytne porucha, zařízení vypněte. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru se zařízením. Zvolte takové umístění zařízení, aby bylo mimo dosah dětí. Zařízení nerozebírejte. Opravu přenechejte autorizovanému servisu. Nevystavujte zařízení působení tepla, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty ani jiným nepříznivým vlivům. Zařízení používejte pouze s původním



příslušenstvím. Zařízení nepoužívejte venku. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí v elektrické síti odpovídá údajům na typovém štítku zařízení. Zařízení nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky, pokud máte nohy ve vodě. Dříve než zařízení zapojíte nebo odpojíte, ujistěte se, že otočný ovladač je v poloze [0] VYPNUTO. NIKDY zařízení neponořujte zcela do vody nebo jiných tekutin za účelem

čištění či jinými účely. NIKDY nepoužívejte zařízení bez vody. Do zařízení nevkládejte žádné jiné předměty. Používejte jej pouze v sedě. NENECHÁVEJTE zařízení zapnuté, pokud jej nepoužíváte, nebo se ho nechystáte použít. Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je síťová šňůra nebo zástrčka poškozena. Pokud zařízení nepracuje správně, spadlo nebo je jakkoli poškozeno, doručte ho do nejbližšího servisního střediska a nechte ho prověřit a opravit. NETAHEJTE za síťovou šňůru. Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pokud jste ospalí. Zařízení POUŽÍVEJTE POUZE na plochém, rovném a stabilním povrchu v místnosti. Zařízení nikdy nepoužívejte venku. Pokud cítíte při používání nepohodlí, nebo používání zařízení vyvolalo bolest či podráždění pokožky obličeje, přestaňte zařízení používat. Zařízení nikdy nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku obličeje, nebo pokud máte alergickou kožní vyrážku. Nejprve se obraťte na svého lékaře. Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.

Děti vyžadují dohled, aby se zajistilo, že si nebudou se zařízením hrát. Používejte zařízení pouze pro účely uvedené v tomto návodu. Zařízení nevystavujte prudkým nárazům ani otřesům. Zařízení musí být vždy v horizontální poloze a na suchém místě. Zařízení musí být pod dozorem, pokud ho používají děti nebo invalidní osoby. Držte zařízení z dosahu horkých objektů. Nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů zařízení. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a starší, pokud je jim poskytnut dohled nebo jsou jim poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumějí příslušnému nebezpečí. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a to pod dohledem. Držte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí, pokud mají méně než 8 let.

Tento spotřebič mohou obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud je jim poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli příslušným nebezpečím.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje nainstalovat do elektrického okruhu, napájecího koupelnu, proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem, nepřevyšujícím 30 mA.

Poradte se s elektrikářem.

Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte z elektrické zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý. V případě poškození síťové šňůry je možná její výměna pouze v autorizovaném servisu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Informace

- Pečujte o svou unavenou pleť, zvláště pociťujete-li na své tváři příznaky stárnutí, úbytek tuku a živin z lícních kostí, brady a rtů, a naopak jejich hromadění na krku.
- Zařízení je určeno pro intenzivní péči o pleť a inhalaci.
- Uvolňuje svaly a zmírňuje bolest.
- Provádí hloubkovou regeneraci pokožky.
- Dodává Vaší pleti mladistvý vzhled.
- Zmírňuje stres a únavu.
- Otevírá póry pro efektivnější čištění a hydratuje pleť.
- K dispozici je také parní nástavec pro nos na inhalování.

Jednoduše se čistí.

Umožňuje použití i aroma (vonné přísady).

Správné použití má za následek zvýšení krevního oběhu v pokožce obličeje, což se projevuje příjemným a dlouhodobým pocitem tepla (vzrůst teploty pokožky).

Obličejová sauna při používání v pravidelných intervalech zlepšuje krevní oběh v obličejové pokožce a uvolňuje nosní a čelní dutiny.

Popis částí



- 1 Maska na obličej
- 2 Nástavec na nos pro inhalaci
- 3 Miska na vodu (uvnitř zařízení)
- 4 Odměrka
- 5 Otočný ovladač výkonu a vypínač (0, 1, 2)
- 6 Posuvný regulátor páry
- 7 Indikátor napájení
- 8 Topná základna

Příprava

Umístění

Vybalte zařízení, odstraňte veškerý obalový materiál a postavte jej na rovný, pevný a tvrdý povrch. Nepokládejte jej například na koberec.

Používání zařízení

1. Postavte topnou základnu na rovný, neklouzavý a vůči vodě odolný povrch.
2. Zařízení je možné používat, jen pokud je naplněné vodou. Naplňte misku teplou vodou dle potřeby pomocí dodávané odměrky. Chcete-li inhalovat nějaký roztok, nakapejte inhalační kapky do vody, případně do vody přidejte bylinky. Neplňte vodu více než po značku „**MAX**“, označenou na vnitřní zadní straně misky na vodu.

Varování

Nikdy neplňte více vody než po značku „**MAX**“ do misky na vodu.


Jinak by se mohlo zařízení přeplnit a voda by se dostala do jeho vnitřku. Mohli byste tím zařízení poškodit a vyřadit.

3. Ujistěte se, že je zařízení **VYPNUTO** (otočný ovladač v poloze **0**). Poté zapojte síťovou šňůru do elektrické zásuvky 230 V~ 50 Hz.
4. Nasadte obličejovou masku na topnou základnu: Výčnělky na obličejové masce musí zapadnout do drážek na základně. Poté otočte obličejovou masku doleva, aby se pevně zajistila na vyhřívací základně.

Pokud chcete používat nástavec na nos pro inhalaci, nasadte ho přímo na základnu. Výčnělky na nástavci na nos musí zapadnout do drážek na základně. Poté otevřete nástavec doleva aby se zajistil na základně.

5. Otočením ovladače zvolte požadovaný výhřevný režim 1 nebo 2.
6. Otočením regulátoru páry na obličejové masce zcela doleva zablokujte otvory pro páru, aby se pára nejdříve naakumulovala.
7. Když se začne voda odpařovat, pohodlně se posaďte s tváří nad zařízení a pomalu přitlačte tvář na obličejovou masku. Zavřete oči a uvolněte se. Regulátor páry pomalu posunujte doprava, aby se odkrývaly otvory pro páru a nastavte si požadovanou intenzitu páry.
8. Inhalujte nebo si jen vychutnávejte teplou páru na pokožce. Při používání obličejové sauny se Vaše pokožka optimálně připraví na další ošetřování, jako je například hloubkové čištění, zvlhčování, obličejové masky apod. Pára oživí pokožku, otevře póry, takže nečistoty se poté dají snadněji odstranit.

Pokud byste se necítili dobře, nebo by Vám byla pára nepříjemná, odtáhněte si obličej trochu dál od masky na obličej nebo snižte intenzitu páry regulátorem. Pokud bude nepříjemný pocit

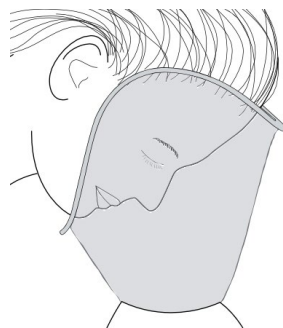

přetrvávat, ukončete používání zařízení.

Upozornění:

Při následujících onemocněních obličejovou masku raději nepoužívejte:

při zánětech pokožky - při zčervenání pokožky - při otocích v obličejové oblasti - při srdečních onemocněních - při problémech s dýcháním - při poraněních v obličejové oblasti - při ekzémch - při lupénce a psoriáze - pokud jste těhotná nebo máte jiné zdravotní problémy

Před používáním při uvedených problémech určitě požádejte o radu lékaře.

9. Když se voda z misky na vodu odpaří, zařízení se automaticky vypne. Když chcete zařízení vypnout dříve, otočte otočný ovladač do polohy 0, aby zhasl indikátor napájení.

UPOZORNĚNÍ: i v případě automatického vypnutí po odpaření veškeré vody je třeba otočný ovladač přepnout do polohy 0. Do polohy 0 otočte ovladač po každém použití.

10. Po vypnutí odpojte zařízení z elektrické sítě, sundejte obličejovou masku, případně nástavec na nos, vylijte případnou zbylou vodu z misky a nechte zařízení vychladnout. Zařízení uskladněte až po jeho vychladnutí.

Tipy

Parní ošetřování mastné pleti

Napařujte si obličej cca 10 až 15 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou a univerzálním čisticím prostředkem na pokožku. Poté natřete tvář vrstvou pleťového mléka nebo peelingovou maskou. Nakonec použijte obličejovou emulzi.

Parní ošetřování suché pleti

Napařujte si obličej cca 5 až 10 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou. Nakonec použijte masku z bělicího krému nebo výživovou emulzi.

Parní ošetřování citlivé pleti

Napařujte si tvář cca 10 minut. Pak si vyčistěte obličej vodou. Nakonec použijte přípravky na citlivou pokožku (krém, výživovou masku apod.).

Parní ošetřování pleti náchylné na tvorbu uhrů a vyrážek

Napařujte si obličej cca 5 až 18 minut. Pomocí tamponu na odstraňování make-upu otřete z obličeje pot a kožní maz. Poté opatrně prsty vytiskněte uhry nebo vyrážky.

Po vytištění ošetřete pleť univerzálním čisticím prostředkem na pokožku, tinkturou na pokožku nebo léčivou emulzí

Čištění a údržba

Jde o zařízení určené k péči o tělo. Před použitím si umyjte obličej a používejte čistou vodu.

Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

Postup čištění základny

Po použití z misky zařízení vylijte vodu, misku a základnu čistěte jen suchým hadříkem navlhčeným vodou. K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo. Zařízení nikdy neponořujte celé do vody.

Čištění obličejové masky, nástavce na nos pro inhalaci a odměrky

Tyto díly vyčistěte v slabém roztoku čisticího saponátu. Pak vše opláchněte čistou vodou a nechte zcela volně vyschnout na vzduchu.

Miska na vodu

Když se začnou vytvářet vápenné usazeniny (vodní kámen) v misce, vyčistěte misku na vodu běžně dostupným odvápnovačem, vhodným i pro hliník. Řiďte se při tom návodem k použití odvápnovače. Místo odvápnovače můžete použít i vodu s octem.

Skladování

Zařízení odpojte z elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je vychladlé a nenachází se v něm voda. Po-
tom ho uskladněte na čisté a suché místo. Před skladováním zařízení omotejte síťovou šňůru
kolem základny.

Technické údaje

Napájení:	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon:	max. 100 W
Třída ochrany:	II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou izolací)
Rozměry (š x v x h):	195 x 280 x 175 mm
Kapacita misky na vodu:	max 50 ml

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.